

RINOTAC[®] SPRAY DO NOSA

wyrób medyczny

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Spray do nosa **RINOTAC[®]**

CO TO JEST SPRAY DO NOSA RINOTAC[®]?

Spray do nosa **RINOTAC[®]** stosowany jest w profilaktyce i do uzupełniającego leczenia suchej lub pokrytej strupami błony śluzowej nosa. **RINOTAC[®]** podaje się do nosa w celu nawilżenia błony śluzowej.

CO ZAWIERA SPRAY DO NOSA RINOTAC[®]?

Spray do nosa **RINOTAC[®]** zawiera: olej sezamowy, witaminę E, mirystynian izopropylu, olejek bergamotowy, olejek goździkowy i przeciwutleniacz (BHT).

JAKIE WŁAŚCIWOŚCI POSIADA SPRAY DO NOSA RINOTAC[®]?

Dzięki zawartości wysokowartościowych składników **RINOTAC[®]** łagodzi podrażnienia, działa regenerująco i kojąco na błonę śluzową nosa. W wielu przypadkach pomaga w regeneracji uszkodzonych obszarów błony śluzowej nosa i chroni przed ponownym podrażnieniem.

Olej sezamowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe i nie posiada znaczącego potencjału alergicznego. Witamina E chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Składniki te wspólnie przyczyniają się do regeneracji i ochrony błony śluzowej nosa, utrzymując jej wilgotność i elastyczność.

W JAKIM CELU STOSUJE SIĘ SPRAY DO NOSA RINOTAC[®]?

W profilaktyce i do uzupełniającego leczenia suchej lub pokrytej strupami błony śluzowej nosa, w przypadku:

- podrażnienia lub suchości błony śluzowej nosa (spowodowanych np. suchym lub zanieczyszczonym powietrzem),

- przeziębienia i kataru,
- kataru alergicznego,
- tworzenia się strupów w nosie,

oraz jako wspomagająca terapia w przypadku przyjmowania leków zmniejszających przekrwienie błony śluzowej nosa.

RINOTAC[®] może być stosowany bez przeciwwskazań w okresie ciąży i karmienia piersią.

Spray do nosa **RINOTAC[®]** jest odpowiedni do stosowania dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia.

JAK UŻYWAĆ SPRAYU DO NOSA RINOTAC[®]?

Kilka razy dziennie, w zależności od indywidualnych potrzeb, po kilka dawek do każdego otworu nosowego. Zalecane 1-3 dawki 2-3 razy dziennie do każdego otworu nosowego.

Podczas aplikacji buteleczkę trzymać w pozycji pionowej!

Spray do nosa **RINOTAC[®]** może być stosowany przez dłuższy czas (do 30 dni).

KIEDY NIE UŻYWAĆ SPRAYU DO NOSA RINOTAC[®]?

W przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek ze składników sprayu **RINOTAC[®]**.

SZCZEGÓLNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA DLA BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Spray do nosa **RINOTAC[®]** nie jest lekiem! W przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych lub przy braku poprawy należy skonsultować się z lekarzem.

Z przyczyn higienicznych oraz aby zapobiec przenoszeniu patogenów produkt powinna używać tylko jedna osoba.

Produkt należy przechowywać zawsze w zamkniętym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci!

RINOTAC[®] SPRAY DO NOSA

wyrób medyczny

OPAKOWANIE

Buteleczka o pojemności 10 ml (zawartość netto) z nasadką do spryskiwania.


DATA WAŻNOŚCI


36 miesięcy. Nie stosować dłużej niż 6 tygodni od pierwszego użycia.


PRZECHOWYWANIE


W temperaturze od 8°C do 25°C.


Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu:

 Dane wytwórcy.

 Data ważności.

 Numer serii.

 Zajrzyj do instrukcji używania.

 Ograniczenie dopuszczalnej temperatury przechowywania wyrobu.

Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2016



MoNo chem-pharm Produkte GmbH,
Leystraße 129, A-1200 Wiedeń

DYSTRYBUTOR:



TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.,
ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice,
www.tactica.pl

