

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Stopery do uszu piankowe



Świat Zdrowia

I. Informacje o produkcie

Model	Najmniejsza średnica (mm)	Największa średnica (mm)	Wartość SNR (dB)
EC-1001A	5	11	38

II. Instrukcja używania

Instrukcja używania: osoby przebywające w hałaśliwym środowisku (o natężeniu dźwięku przekraczającym 80 dB) powinny cały czas nosić stopery do uszu. Stopery należy dobrać odpowiednio do ich współczynnika tłumienia hałasu tak, aby skutecznie go zredukować (zobacz parametry techniczne). Należy upewnić się, że stopery do uszu są prawidłowo założone, dopasowane, wyregulowane, konserwowane i kontrolowane zgodnie z niniejszą instrukcją.

Przed założeniem zatyczek do uszu upewnij się, że dłonie i zatyczki są czyste.

1. Zwiń zatyczkę do uszu opuszkami palców, aby ścisnąć ją w cienki, pozbawiony zagnieceń cylinder.
2. Włóż mocno ściśniętą zatyczkę do kanału słuchowego. Pociągnięcie ucha na zewnątrz i do góry ułatwia dopasowanie.
3. Trzymaj, aż zatyczka się rozwinie.
4. Upewnij się, że zatyczka jest dobrze dopasowana.



Ograniczenia używania: jeśli niniejsza instrukcja nie jest przestrzegana, ochrona zapewniana przez stopery do uszu jest znacznie ograniczona.

Wyjmuj zatyczki powoli, delikatnie je przekraczając, żeby stopniowo je poluzować.

Gwałtowne usunięcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.

Sprawdź regularnie, czy zatyczki nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zatyczki należy ją natychmiast wymienić.

Nie używaj do nurkowania, nie zaleca się stosowania na głębokości większej niż 1,5 metra.

Trzymaj z dala od dzieci – produkt grozi zadławieniem.

Przechowywanie: stopery do uszu powinny być przechowywane w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczone przed mrozem i światłem, a także chronione przed kurzem, tłuszczem i środkami chemicznymi. Jednorazowe stopery są przeznaczone do jednorazowego użytku – po użyciu należy je wyrzucić. Nie używać, jeśli pojedyncze plastikowe opakowanie zostało uszkodzone lub otwarte.

Ostrzeżenia:

- Jeśli zalecenia nie będą przestrzegane, skuteczność ochrony zapewnianej przez stopery do uszu będzie poważnie ograniczona.
- Ten produkt może być nieodporny na działanie niektórych substancji chemicznych. Dodatkowych informacji należy zasięgnąć u producenta.
- Stopery do uszu zostały zaprojektowane w celu ochrony użytkownika przed szkodliwym działaniem hałasu.
- Okres trwałości produktu wynosi 3 lata – licząc od daty produkcji do momentu utraty przydatności, pod warunkiem, że opakowanie pozostaje zamknięte.

Parametry: produkt spełnia podstawowe wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 oraz poniższe normy. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej: <http://www.cn-safety.com/> w danych dotyczących produktu.

CE 2777 Rozporządzenie (UE) 2016/425

EN352-2:2020 – Ochrona słuchu – Wymagania ogólne – Część 2: Stopery do uszu

Przetestowane zgodnie z normą EN 352-2:2020

Dane dotyczące tłumienia

Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	30,1	34,2	41,0	41,7	38,2	45,2	45,7
Odchylenie standardowe (dB)	3,9	4,0	4,1	4,7	3,0	4,1	4,6
APV (dB)	26,2	30,2	36,9	37,0	35,2	41,0	41,1
SNR (dB) = 38,0 SNR_m = 40,8 SNR_s = 2,9 H84 (dB) = 37 H_m = 40,1 H_s = 2,9 M84 (dB) = 36 M_m = 39,5 M_s = 3,2 L84 (dB) = 32 L_m = 36,0 L_s = 3,6							

Przetestowane zgodnie z normą ANSI S3.19-1974

Dane dotyczące tłumienia

Częstotliwość (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	40,6	41,6	46,8	43,3	39,4	47,6	48,6
Odchylenie standardowe (dB)	5,7	5,8	5,2	4,6	4,5	3,4	3,3
NRR 32 dB							

Producent: Guangdong J&Y Industrial Co., Ltd.
No. 285 Juhuashi Rd, Huashan Town, Huadu District,
Guangzhou, Chiny 510880
Tel. +86 20 36853918
e-mail: sales009@cn-safety.com

Jednostka notyfikowana: SATRA Technology Europe Ltd
Bracetown Business Park,Clonee, Dublin,D15 YN2P, Irlandia
Numer jednostki notyfikowanej: 2777
SATRA Technology Europe jest odpowiedzialna
zarówno za badanie typu UE, jak i za bieżącą zgodność.

Importer: Synoptis Industrial Sp. z o.o.
ul. Forteczna 35-37
87-100 Toruń, Polska
e-mail: kontakt@synoptisindustrial.pl
www.synoptisindustrial.pl

Dystrybutor: Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa, Polska
e-mail: office@synoptispharma.com
www.synoptispharma.pl



Symbol	Opis symbolu
	Producent
	Numer serii
	Numer katalogowy
	Data produkcji
	Data ważności
	Dystrybutor
	Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia wymagania rozporządzeń UE dotyczących środków ochrony indywidualnej