

Nawilżające krople do oczu bez konserwantów z hialuronianem sodu 0,3%

Należy zapoznać się uważnie z całą instrukcją użycia przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ważne informacje. Należy zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

OPIS I WSKAZANIA

Nawilżające krople do oczu Euphrasia Hyalo Pure długotrwale nawilżają suche, zmęczone i wrażliwe oczy. Przynoszą szybką ulgę w przypadku zaczerwienionych oczu, łagodzą podrażnienia i zmniejszają uczucie dyskomfortu powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych.

Wyrób medyczny Euphrasia Hyalo Pure jest szczególnie wskazany w przypadku:

- narażenia narządu wzroku na drażniące czynniki środowiskowe (pył, dym, kurz, promieniowanie UV),
- noszenia soczewek kontaktowych wszystkich typów,
- długotrwałego oglądania telewizji, czytania, pracy przed ekranem monitora, długiej jazdy samochodem,
- przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Krople Euphrasia Hyalo Pure mogą być stosowane ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.

SKŁAD

Hialuronian sodu BP 0,3% w/v, chlorek sodu BP 0,9% w/v, wodorofosforan disodowy BP 0,028% w/v, diwodorofosforan sodu dwuwodny BP 0,004% w/v, woda do iniekcji.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie umyć ręce.
- Przed pierwszym użyciem należy zerwać plombę zabezpieczającą.
- Zdjąć nakrętkę ochronną i otworzyć butelkę.
- Odwrócić butelkę do góry dnem i wywierać lekki nacisk, aby zakropić dwie lub trzy krople do każdego oka lub stosować zgodnie ze wskazówkami lekarza okulisty.
- Stopniowe opróżnianie butelki może wiązać się z koniecznością zastosowania wysokiego ciśnienia w celu umożliwienia podania produktu. Wynika to z właściwości mechanizmu zamknięcia, który ma na celu zachowanie sterylności oraz właściwości chemicznych i fizycznych roztworów bez konserwantów.
- Po użyciu szczelnie zakręcić nakrętkę.

INSTRUKCJA ZAKRAPLANIA

1.



- Czystym palcem odchylić dolną powiekę zakraplanego oka.
- Wkropić 2 lub 3 krople Euphrasia Hyalo Pure do worka spojówkowego uważając aby nie dotknąć gałki ocznej końcówką zakraplacza.

2.



- Po zakropieniu nie mrugać, zamknąć oko na około 1 minutę i delikatnie ucisnąć okolicę kąćka oka tak jak na rysunku. Umożliwi to prawidłowe rozprowadzenie kropli na powierzchni gałki ocznej oraz zapobiegnie odprowadzeniu roztworu do kanalikula nosowo-łzowego.

PRZECIWSKAZANIA

- nie używać po upływie daty ważności,
- w przypadku odczuwania dyskomfortu oka, podrażnienia, bólu, zaczerwienienia lub nieostrego widzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą,
- nie stosować jeśli istnieje nadwrażliwość na którykolwiek składnik wyrobu medycznego. Jeśli dolegliwości nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem,
- nie stosować produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używać, jeśli przed pierwszym użyciem plomba zabezpieczająca jest uszkodzona.
- Produkt jest przeznaczony do użycia przez jednego pacjenta.

- Nie używać po upływie terminu ważności.
- Roztwór należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia butelki.
- Zamknąć nakrętkę po każdym użyciu.
- Unikać dotykania końcówką kroplomierza oczu lub jakiejkolwiek innej powierzchni.
- Przechowywać w temperaturze od 5 do 30 stopni Celsjusza.
- Trzymać z dala od światła słonecznego.
- Nie sterylizować ponownie.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

UTYLIZACJA

wylej niezużyta zawartość do kanalizacji,
puste opakowanie należy usunąć zgodnie z miejscowymi zasadami segregacji odpadów.

OPAKOWANIE

Krople Euphrasia Hyalo Pure dostępne są w opakowaniu 10 ml

IMPORTER

nexon
pharma

NEXON PHARMA Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Chelmszyńska 249, 04-458 Warszawa

www.nexonpharma.pl

WYTWÓRCA

Stericon Pharma Pvt. Ltd.

9R, Sub Layout of Plot No. 9

1st Phase, Bommasandra Industrial Area, Bangalore, India

Code No.: KR/DRUGS/KTK/28/332/2002

EC REP MYM STC, SL. Avda. de los Rosales 32, 28935 Móstoles Madrid, Spain.

Email: direccion@mym-stc.com

Data opracowania instrukcji użytkowania: 10/2025

PELI-159/R0

Wyrób medyczny sterylny	
Recykling	
Przechowywać w temperaturze od 5° - 30°C	
Instrukcja używania	
Ostrzeżenie	
Nie sterylizować ponownie	
Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone	
Chronić przed światłem słonecznym	